




## 1. SCHOONMAKEN

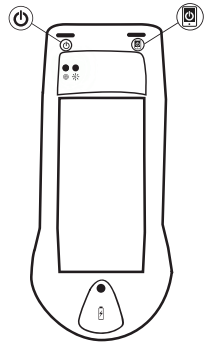


a. Zorg dat de i:X UIT staat of zet het toestel UIT en het weergavescherm UIT.

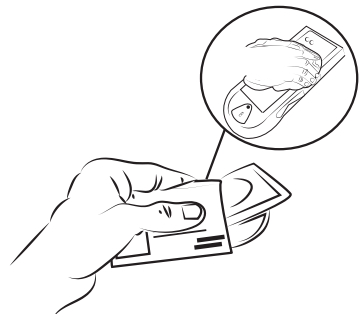


b. Gebruik een desinfecterend doekje om de i:X vooraf schoon te maken.

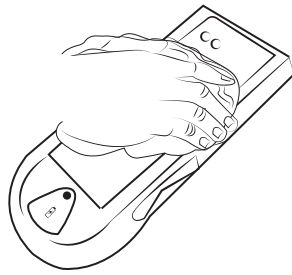

c. Gebruik een tweede desinfecterend doekje om het hele toestel schoon te vegen, inclusief alle spleten.

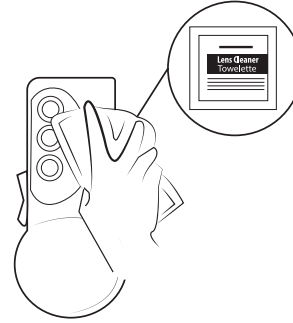

d. Gebruik lensdoekje om alle glazen oppervlakken schoon te maken.

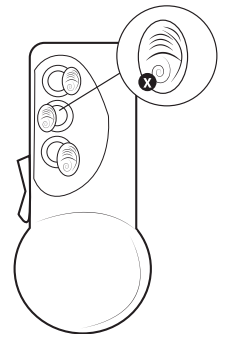


e. Controleer of alle vensters schoon zijn, vrij van vuil en vingerafdrukken.


## 2. OPLADEN




a. Laad het toestel en het weergavescherm op met de stroomkabel van de MolecuLight.

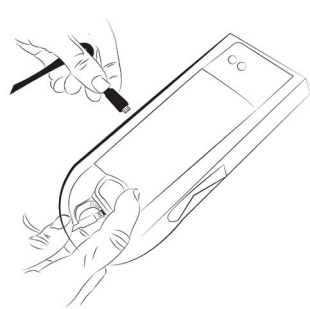


b. Een kant van de stroomkabel gaat in het toestel en de andere kant in het weergavescherm:

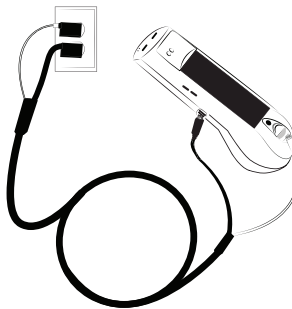

c. Beide oplaadstekkers moeten in het stopcontact gestoken worden.

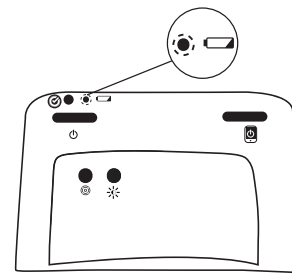


d. Ledlampjes knipperen wanneer het toestel wordt opgeladen.

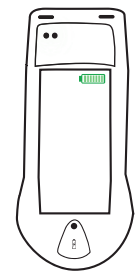


e. Het icoon van de batterij is zichtbaar wanneer het weergavescherm wordt opgeladen.


## 3. AANZETTEN

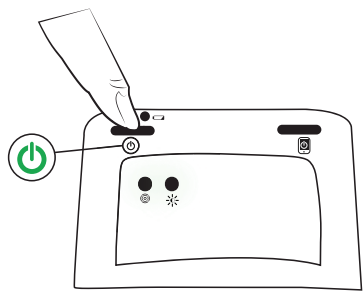


a. Druk (3 seconden) op de aan-/uitknop om het toestel aan te zetten.

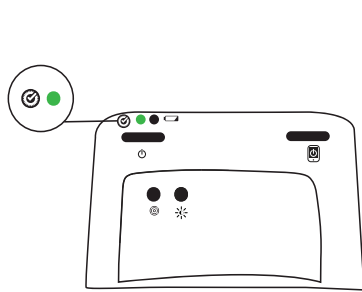


b. Controleer of het ledlampje voor de systeemstatus groen wordt (indien geel of rood, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing).

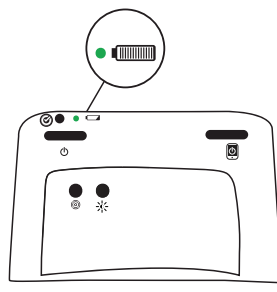

c. Controleer de status van de batterij op het toestel (groen geeft maximum oplaadcapaciteit aan),

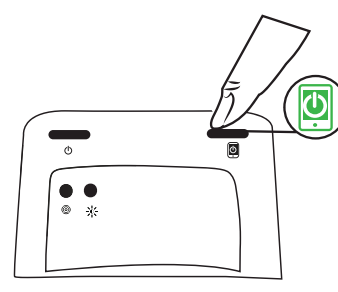


d. Druk (3 seconden) op de aan-/uitknop van het scherm om het weergavescherm aan te zetten.

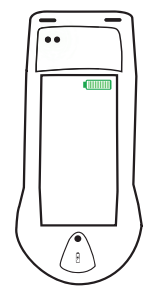


e. Controleer het batterijniveau van het weergavescherm.


## 4. EEN STANDAARD AFBEELDING/VIDEO OPNEMEN

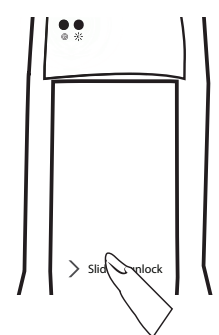


a. Druk op de home-knop en selecteer de schuifbalk.

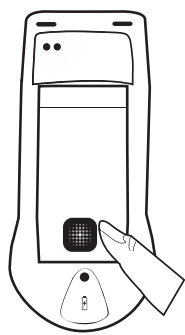


b. Selecteer de app iX Camera op het weergavescherm.

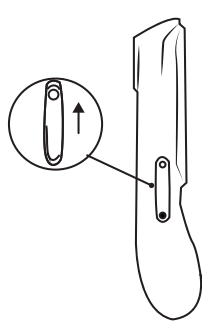


c. Zet tuimelschakelaar omhoog.

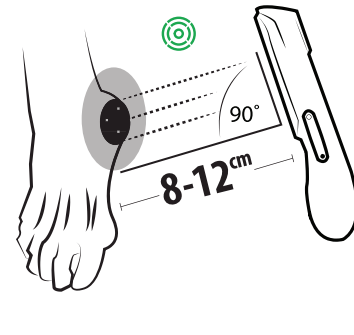

d. Gebruik het ledlampje voor de sensor bereikmeter om de juiste afstand te bereiken (ledlampje wordt groen).

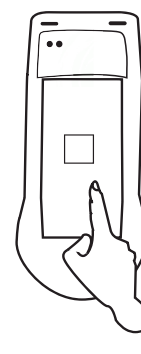


e. Tik op het scherm om scherp te stellen indien nodig.

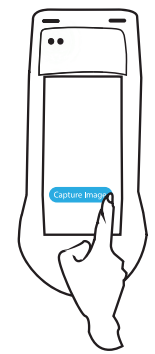


f. Afbeeldingen en/of video vastleggen, ledlampje sensor bereikmeter moet groen blijven.


## 5. EEN FLUORESCENTIE-AFBEELDING/VIDEO OPNEMEN

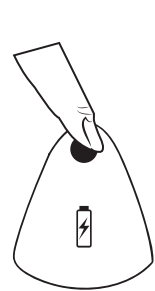


a. Gebruik de home-knop voor toegang tot het scherm, selecteer schuifknop indien nodig.

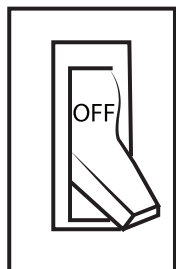


b. Doe de lichten in de ruimte uit.

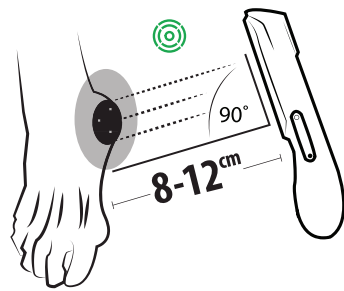


c. Gebruik het ledlampje voor de sensor bereikmeter om de juiste afstand te bereiken (ledlampje wordt groen).

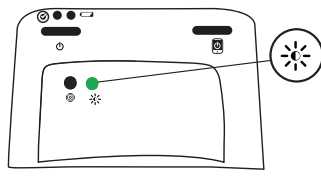


d. Controleer of het ledlampje van de sensor voor het omgevingslicht groen is voordat u de tuimelschakelaar in de FL-Mode zet.

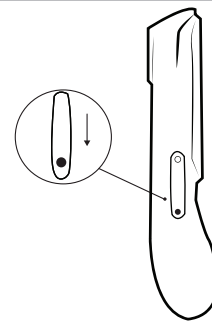

e. Schakel naar FL-Mode; het ledlampje van de sensor van het omgevingslicht gaat uit wanneer de FL-Mode wordt geactiveerd.


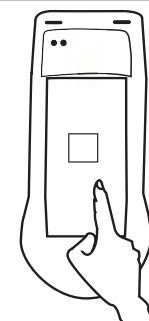


f. Tik op het scherm om scherp te stellen indien nodig.

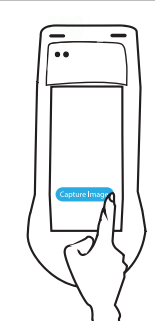


g. Leg de afbeelding en/of video vast, het ledlampje van de sensor bereikmeter moet groen blijven.

## 6. UITZETTEN

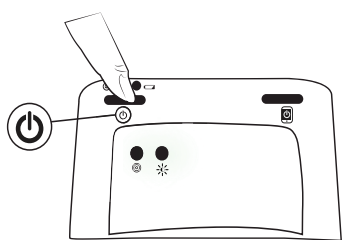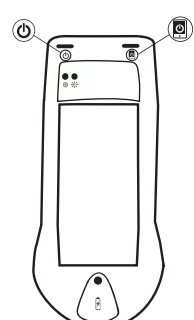

a. Zet het toestel uit door 3 seconden op de aan-/uitknop te drukken.

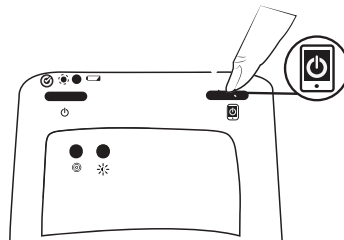

b. Zet het weergavescherm uit door 3 seconden op de aan-/uitknop van het scherm te drukken.

