




1. PUHDISTUS

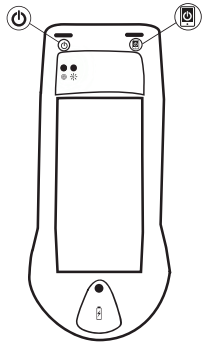


a. Varmista, että i:X on pois sammutettu tai sammuta laite ja näyttö.

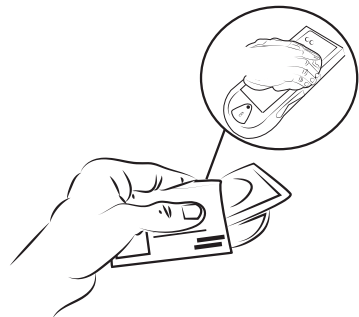


b. Esipuhdista i:X desinfiointipyyhkeellä.

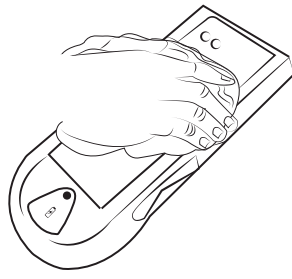

c. Pyyhi koko laite, kaikki raot mukaan lukien, toisella desinfiointipyyhkeellä.

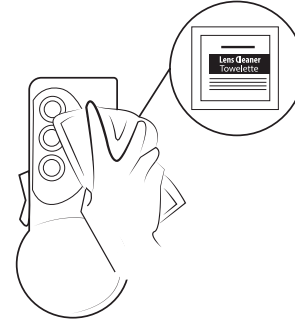

d. Puhdista kaikki lasipinnat linsseille tarkoitettulla puhdistuspyyhkeellä.

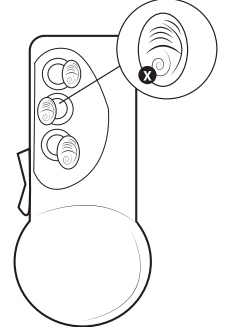

e. Tarkista, että kaikki ikkunat ovat puhtaita ja että niissä ei ole likaa tai sormenjälkiä.


2. LATAUS




a. Lataa laite ja näyttö MolecuLight-virtajohdon avulla.




b. Yksi virtajohdon päästä liitetään laitteeseen ja toinen näyttöön.

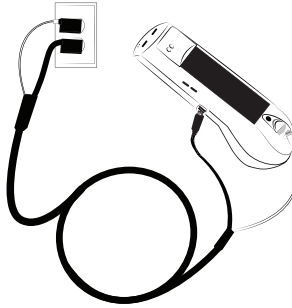

c. Kumpikin latauspää kytketään seinäpistorasialliittimeen.

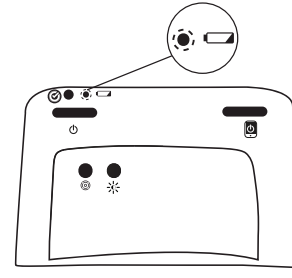


d. LED-merkkivalo vilkkuu, kun laitetta ladataan.

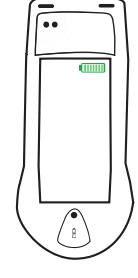


e. Akkukuvake on näkyvässä, kun näyttöä ladataan.


3. KYTKEMINEN PÄÄLLE

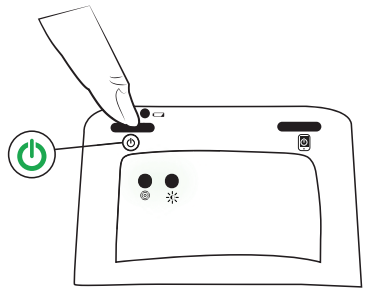


a. Paina virtapainiketta (3 sekuntia) kytkeäksesi laitteeseen virran.

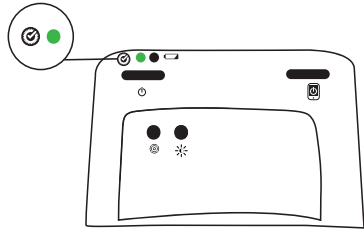


b. Tarkista, että järjestelmän tilan LED-merkkivalo palaa vihreänä (jos keltainen tai punainen, katso käyttöopasta).

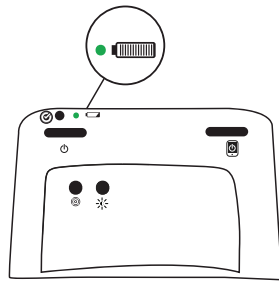

c. Varmista laitteen akun tila (vihreä tarkoittaa, että akku on täynnä).

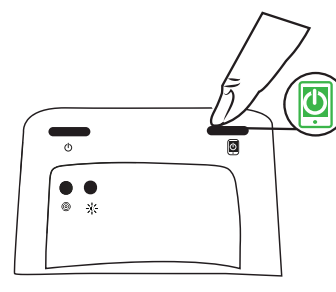


d. Paina näytön virtapainiketta (3 sekuntia) kytkeäksesi näyttöön virran.

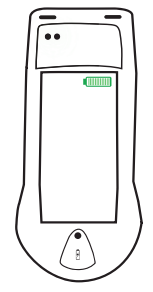


e. Vahvista näytön akun varaus.


4. KUVAN/VIDEON TALLENTAMINEN TAVALLISELLA VALOLLA

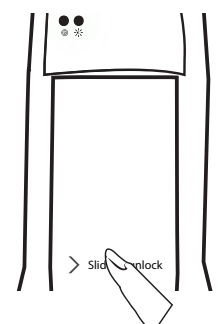


a. Paina kotinäppäintä ja valitse liukusäädin.

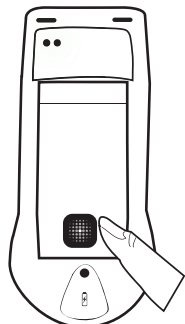

b. Valitse iX Camera -sovellus näytöltä.

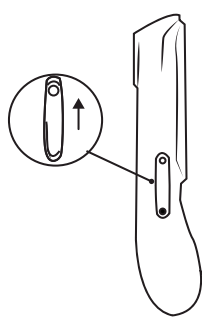


c. Aseta keinukytkin yläasentoon.

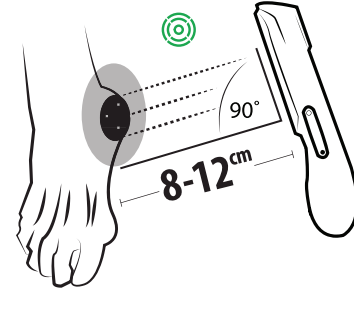

d. Määritä sopiva etäisyys etäisyysmittarin anturin LED-merkkivalon avulla (LED-merkkivalo vaihtuu vihreäksi).




e. Tarkenna napauttamalla näyttöä tarpeen mukaan.

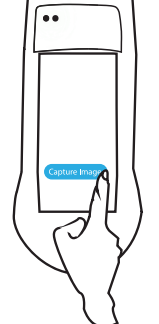


f. Tallenna kuva ja/tai video: etäisyysmittarin anturin LED-merkkivalon tulee palaa edelleen vihreänä.


5. KUVAN/VIDEON TALLENTAMINEN FLUORESENSSIVALOLLA

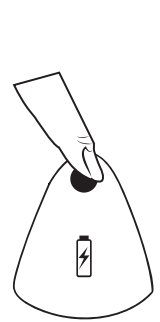


a. Aktivoi näyttö kotinäppäimen avulla ja valitse liukusäädin tarpeen mukaan.

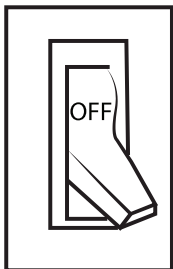


b. Sammuta huoneen valot.

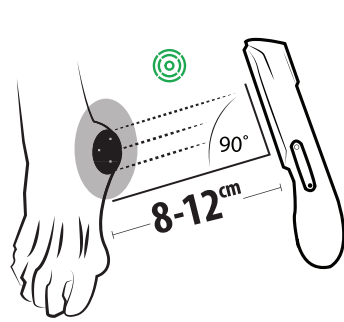


c. Määritä sopiva etäisyys etäisyysmittarin anturin LED-merkkivalon avulla (LED-merkkivalo vaihtuu vihreäksi).

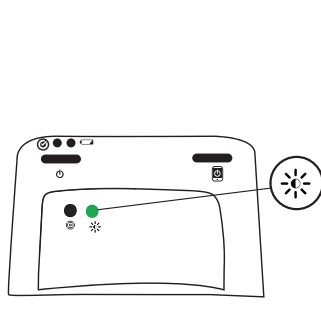


d. Varmista, että hajavaloanturin LED-merkkivalo palaa vihreänä ennen kuin siirrät keinukytkimen FL-tilaan.

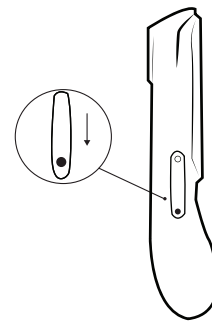

e. Siirry FL-tilaan: hajavaloanturin LED-merkkivalo sammuu, kun FL-tila aktivoidaan.


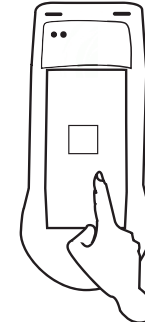


f. Tarkenna napauttamalla näyttöä tarpeen mukaan.

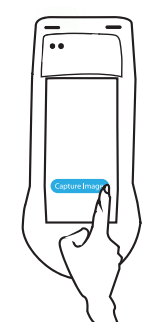


g. Tallenna kuva ja/tai video: etäisyysmittarin anturin LED-merkkivalon tulee palaa edelleen vihreänä.

6. VIRRAN KATKAISEMINEN

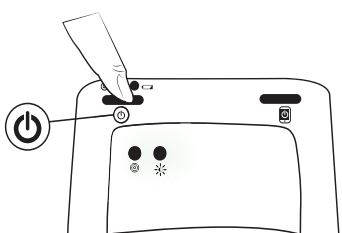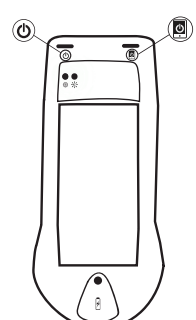

a. Sammuta laite painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan.

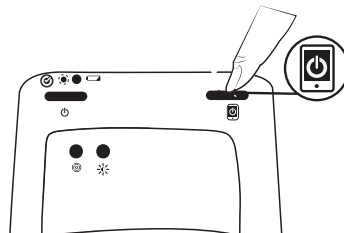

b. Sammuta näyttö painamalla näytön virtapainiketta 3 sekunnin ajan.



MolecuLight