



# MolecuLight *i:X*™ GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


## 1. NETTOYAGE

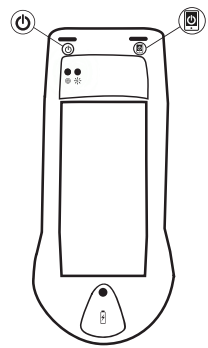

a. S'assurer que *i:X* est en arrêt ou éteindre le dispositif et l'écran d'affichage

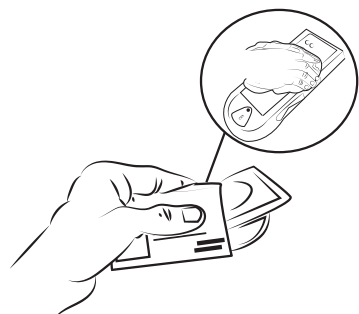


b. Utiliser une lingette désinfectante pour pré-nettoyer le *i:X*

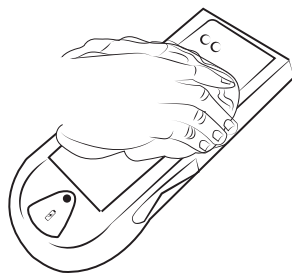

c. Utiliser une deuxième lingette désinfectante pour désinfecter l'ensemble du dispositif, y compris toutes les crevasses



d. Utiliser une lingette à lentilles pour nettoyer toutes les surfaces du verre

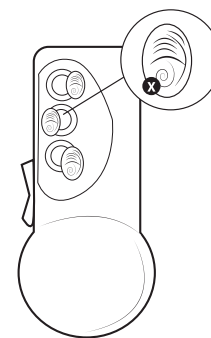


e. Vérifier que toutes les fenêtres soient propres, libres de tout débris et d'empreintes digitales


## 2. CHARGEMENT




a. Charger le dispositif et l'écran d'affichage avec le câble d'alimentation MolecuLight *i:X*

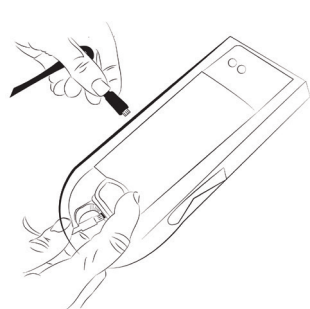


b. Une extrémité du câble d'alimentation se connecte au dispositif et l'autre à l'écran d'affichage

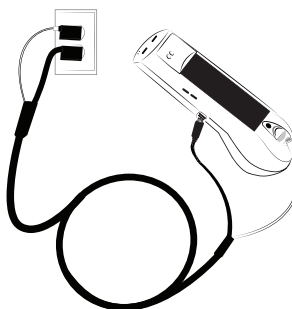

c. Les deux extrémités de chargement doivent être branchées sur le connecteur mural

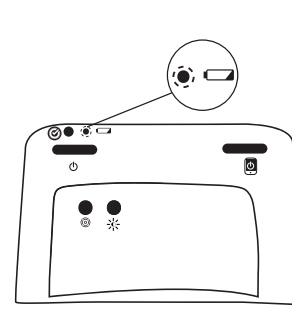


d. Le voyant DEL clignote en vert lorsque le dispositif est en cours de chargement

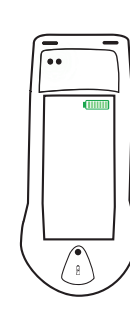


e. L'icône de la batterie sur l'écran sera visible lorsque l'écran d'affichage est en charge


## 3. ALLUMER

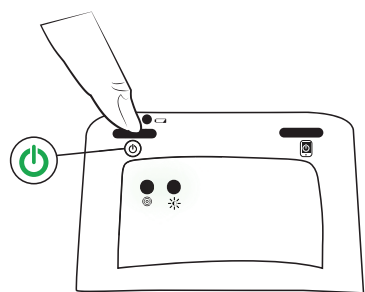


a. Pousser le bouton d'alimentation (3 sec) pour allumer le dispositif

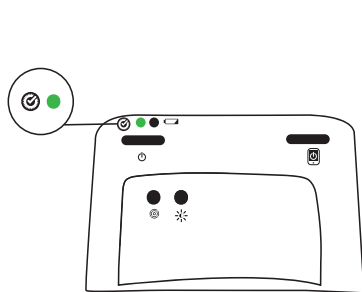


b. Sélectionner l'application MolecuLight sur l'écran d'affichage

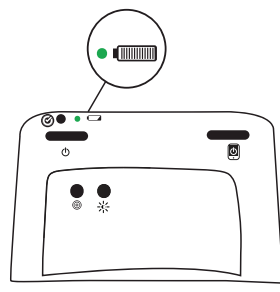

c. Positionner l'interrupteur à bascule en position haute (position ST-Mode)

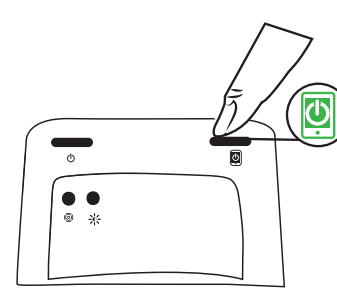


d. Vérifier l'état de la batterie sur le dispositif (vert indique la capacité de charge maximale)

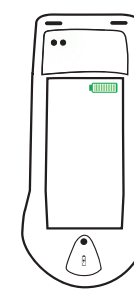


e. Vérifier la capacité de la batterie de l'écran d'affichage


## 4. CAPTURER UNE IMAGE ET/OU UNE VIDÉO

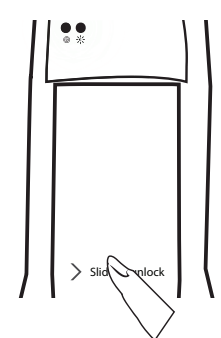


a. Appuyer sur le bouton d'accueil et sélectionner le curseur

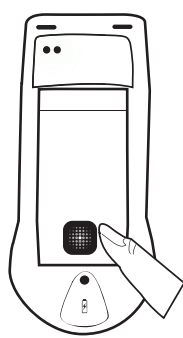


b. Sélectionner l'application MolecuLight sur l'écran d'affichage

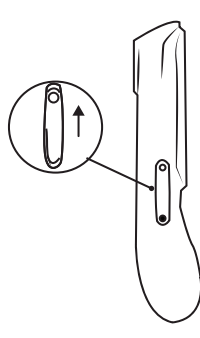


c. Positionner l'interrupteur à bascule en position haute (position ST-Mode)

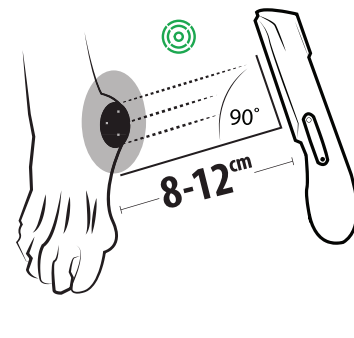

d. Utiliser le capteur télémètre pour atteindre la distance appropriée (le voyant DEL devient vert)

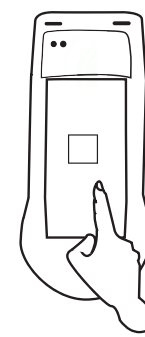


e. Taper sur l'écran pour améliorer le ciblage, si nécessaire

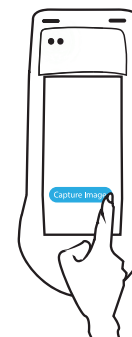


f. Capturer une image et/ou une vidéo, le voyant DEL du télémètre doit rester vert.


## 5. CAPTURER UNE IMAGE ET/OU UNE VIDÉO FLUORESCENTE

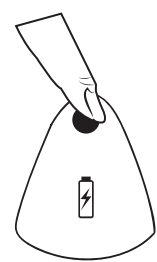


a. Utiliser le bouton d'accueil pour accéder à l'écran; sélectionner le curseur si nécessaire

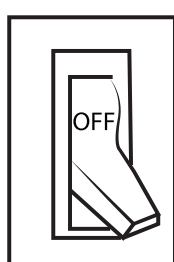


b. Éteindre les lumières de la salle

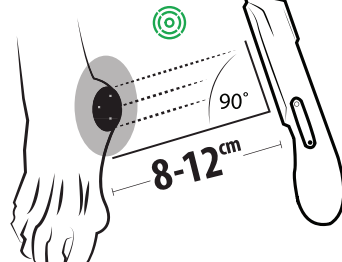


c. Utiliser le capteur télémètre pour atteindre la distance appropriée (le voyant devient vert)

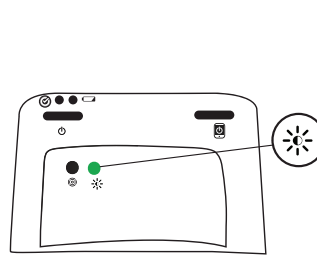


d. Confirmer que le capteur DEL de la lumière ambiante est vert avant de basculer l'interrupteur en FL-Mode

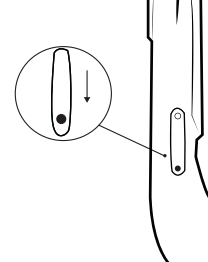

e. Basculer vers le FL-Mode; Le capteur DEL de la lumière ambiante s'éteint lorsque FL-Mode est activé


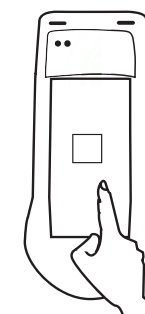


f. Taper sur l'écran pour améliorer le ciblage, si nécessaire

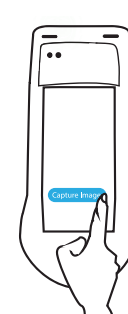


g. Capturer une image et/ou une vidéo, le capteur DEL du télémètre doit rester vert.

## 6. ÉTEINDRE

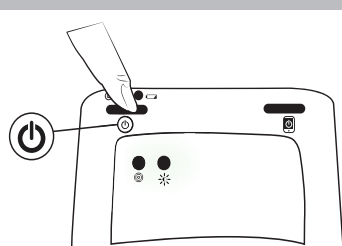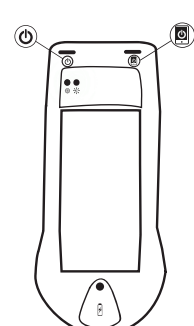

a. Éteindre le dispositif en appuyant sur le bouton ARRÊT pendant 3 secondes

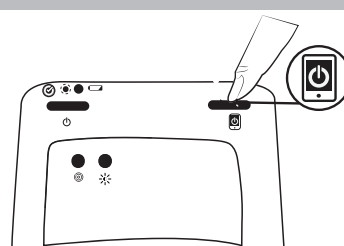

b. Éteindre l'écran d'affichage en appuyant sur le bouton ARRÊT pendant 3 secondes



MolecuLight