




## 1. REINIGEN

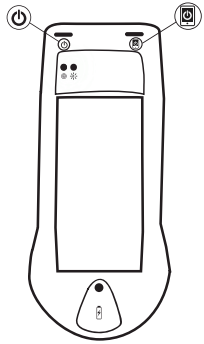


a. Stellen Sie sicher, dass das MolecuLight i:X aus ist; andernfalls schalten Sie das Gerät und den Bildschirm aus.

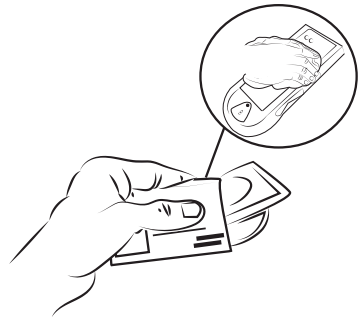


b. Verwenden Sie ein Desinfektionstuch zur Vorreinigung des MolecuLight i:X.

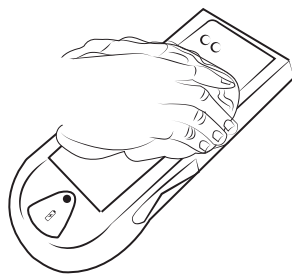

c. Nehmen Sie ein zweites Desinfektionstuch und desinfizieren Sie damit das gesamte Gerät einschließlich aller Ritzen.

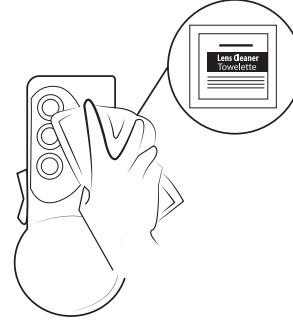

d. Verwenden Sie ein Linsenreinigungstuch zum Reinigen aller Glasflächen.

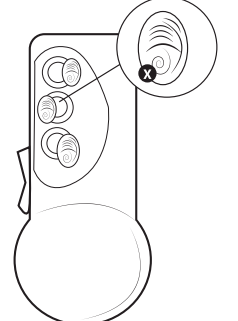


e. Stellen Sie sicher, dass alle optischen Gläser sauber und frei von Ablagerungen und Fingerabdrücken sind.


## 2. LADEN




a. Laden Sie Gerätebatterie und Bildschirmbatterie mit dem MolecuLight Netzkabel

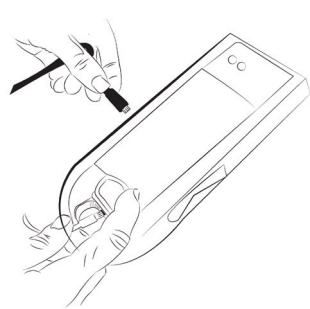


b. Verbinden Sie das eine Ende des Netzkabels mit dem Gerät und das andere mit dem Bildschirm

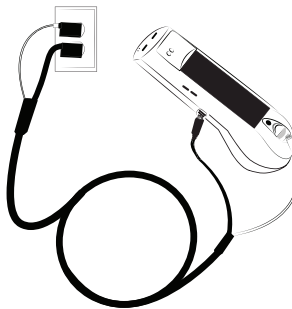

c. Stecken Sie jeden der beiden Netzadapter in eine Steckdose

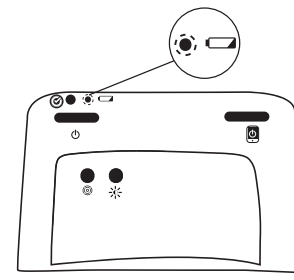


d. Während die Gerätebatterie geladen wird, blinkt die Batteriestatus-LED grün.

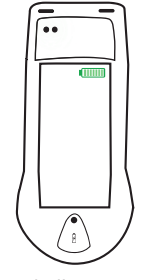


e. Während die Bildschirmbatterie geladen wird, ist das Batteriesymbol auf dem Bildschirm sichtbar.


## 3. EINSCHALTEN

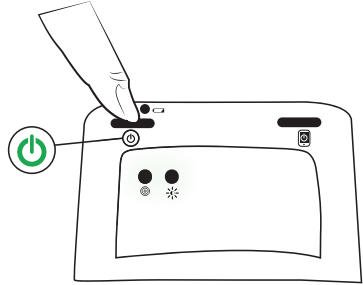


a. Drücken Sie den Geräteschalter 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten

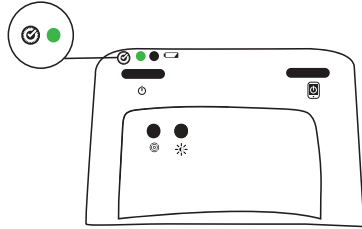


b. Vergewissern Sie sich, dass die Systemstatus-LED grün ist (falls sie gelb oder rot ist, schauen Sie bitte im Benutzerhandbuch nach)

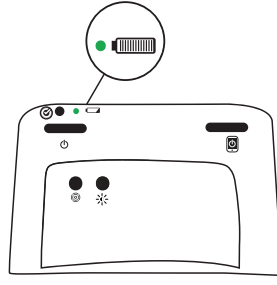

c. Drücken Sie den Bildschirmschalter 3 Sekunden lang, um den Bildschirm einzuschalten

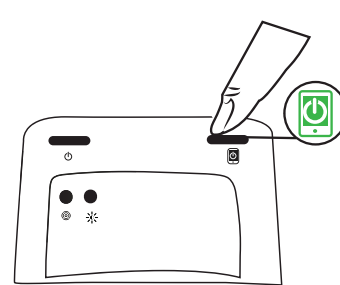


d. Prüfen Sie den Status der Gerätebatterie (grün bedeutet maximale Ladekapazität)

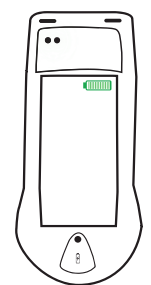


e. Prüfen Sie die Ladekapazität der Bildschirmbatterie


## 4. BILDER/VIDEOS MIT STANDARDLICHT AUFNEHMEN

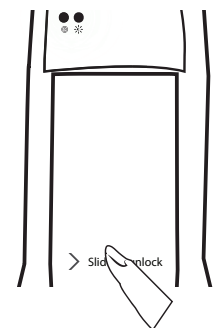


a. Drücken Sie die Home-Taste und betätigen Sie den Schieberegler zum Entsperrn

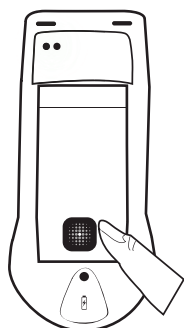


b. Wählen Sie auf dem Bildschirm die MolecuLight iX Kamera-App

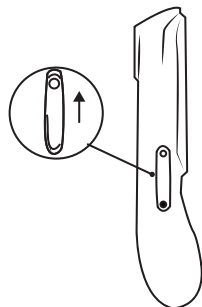


c. Schalten Sie den Wippschalter in die obere Position (für den Standard-Modus)

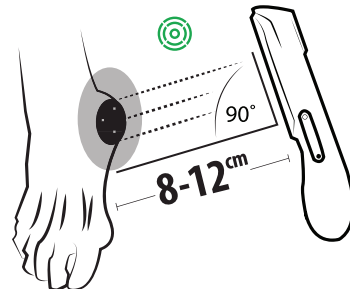

d. Benutzen Sie die LED des Entfernungsmesser-Sensors, um den passenden Abstand zu finden (die LED wird dann grün)

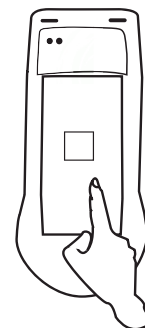


e. Tippen Sie gegebenenfalls auf den Bildschirm, um die Scharfeinstellung zu verbessern

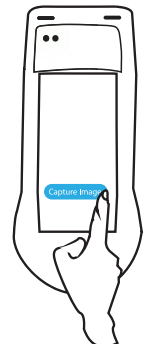


f. Nehmen Sie Bilder und/oder Videos auf; achten Sie darauf, dass die LED des Entfernungsmesser-Sensors grün bleibt


## 5. BILDER/VIDEOS MIT FLUORESCENZ-LICHT AUFNEHMEN

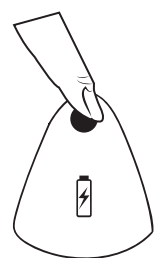


a. Drücken Sie die Home-Taste, um den Bildschirm aufzurufen; falls nötig betätigen Sie den Schieberegler zum Entsperrn

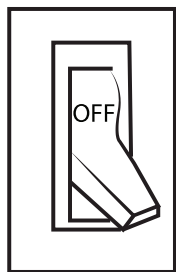


b. Schalten Sie die Raumbeleuchtung aus

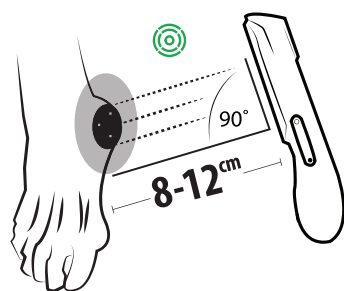

c. Benutzen Sie die LED des Entfernungsmesser-Sensors, um den passenden Abstand zu finden (die LED wird dann grün)

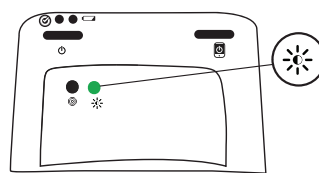


d. Vergewissern Sie sich, dass die Umgebungslicht-LED grün ist, ehe Sie den Wippschalter in den Fluoreszenz-Modus umschalten

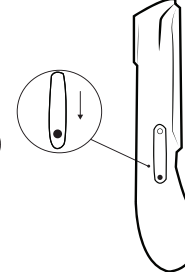

e. Schalten Sie in den Fluoreszenz-Modus; die Umgebungslicht-LED schaltet sich aus, wenn der Fluoreszenz-Modus aktiviert wird





f. Tippen Sie gegebenenfalls auf den Bildschirm, um die Scharfeinstellung zu verbessern

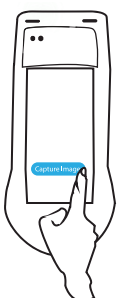


g. Nehmen Sie Bilder und/oder Videos auf; achten Sie darauf, dass die LED des Entfernungsmesser-Sensors grün bleibt

## 6. AUSSCHALTEN

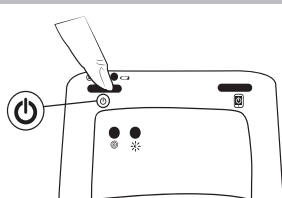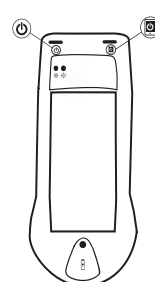

a. Drücken Sie den Geräteschalter 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten

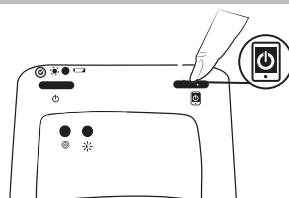

b. Drücken Sie den Bildschirmschalter 3 Sekunden lang, um den Bildschirm auszuschalten

