



# MolecuLight i:X™ GUÍA DE INICIO RÁPIDO


## 1. LIMPIEZA

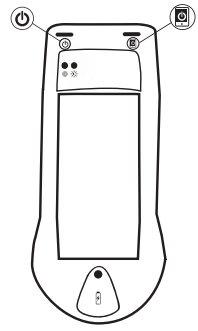


a. Asegúrese de que MolecuLight i:X esté apagado. De no ser así, apague tanto el dispositivo como la pantalla de visualización.

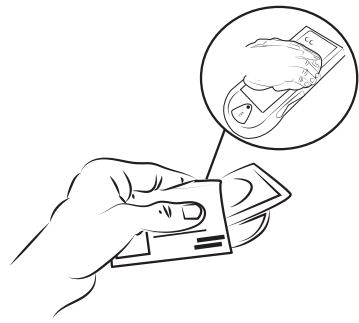


b. Utilice una toallita desinfectante para limpiar MolecuLight i:X.

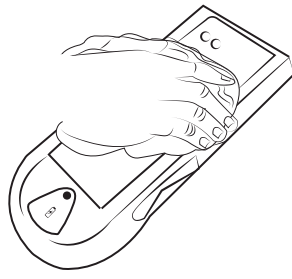

c. Utilice una segunda toallita desinfectante para limpiar todo el dispositivo, incluidas todas las ranuras.

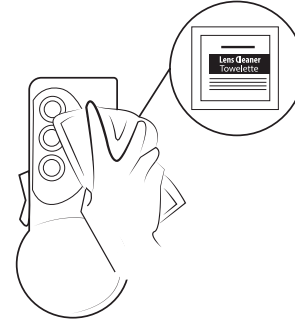

d. Utilice las toallitas limpiadoras de lentes para limpiar todas las superficies de cristal.

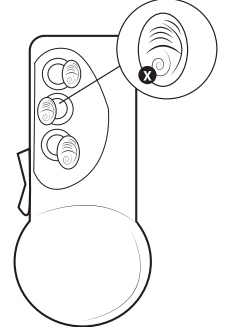


e. Compruebe que todas las ventanas ópticas estén limpias, sin partículas ni huellas dactilares.


## 2. CARGA




a. Cargue el dispositivo y la pantalla de visualización con el cable de alimentación de MolecuLight i:X.

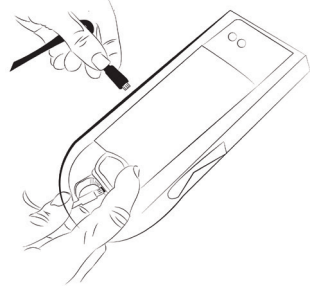


b. Un extremo del cable se conecta al dispositivo y el otro, a la pantalla de visualización.

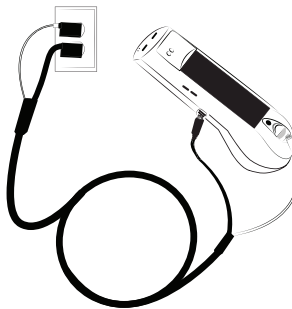

c. Ambos extremos deben conectarse a una toma de pared.

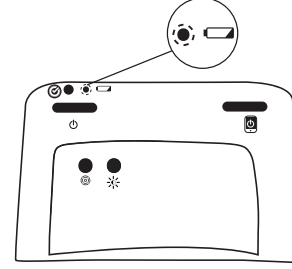


d. Cuando el dispositivo se está cargando, el indicador luminoso parpadea en verde.

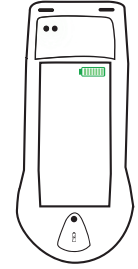


e. Cuando el dispositivo se está cargando, aparece el icono de la batería en la pantalla.


## 3. ENCENDIDO (ON)

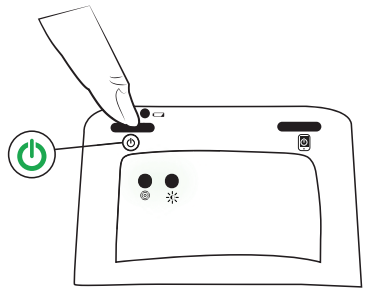


a. Mantenga presionado el botón de encendido del dispositivo durante 3 segundos para encenderlo.

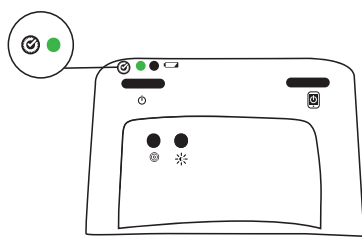


b. Compruebe que el indicador luminoso del estado del sistema está en verde (en caso de que esté en amarillo o rojo, deberá consultar el manual del usuario).

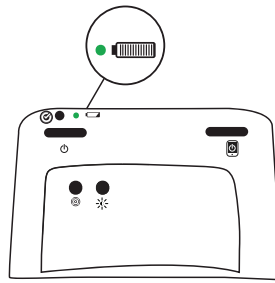

c. Mantenga presionado el botón de encendido de la pantalla durante 3 segundos para encenderla.

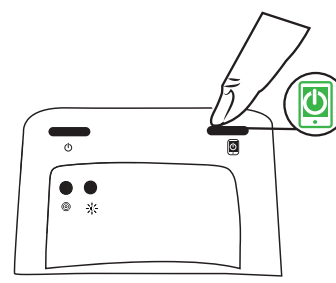


d. Compruebe el estado de la batería del dispositivo (la luz verde indica que la batería está en su máxima capacidad de carga).

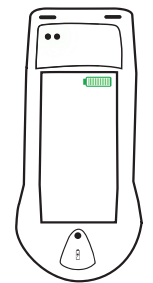


e. Compruebe el estado de la batería de la pantalla de visualización.


## 4. TOMA DE IMÁGENES Y VÍDEOS EN MODO ESTÁNDAR

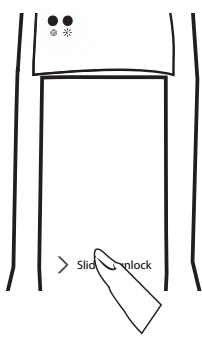


a. Presione el botón de inicio y utilice el control deslizante.

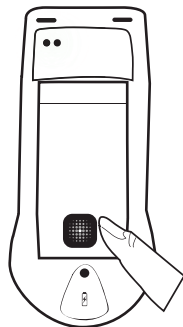


b. Seleccione la aplicación de MolecuLight en la pantalla.

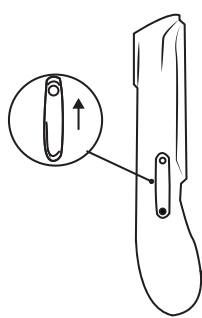


c. Deslice el interruptor basculante hacia arriba (modo ST).

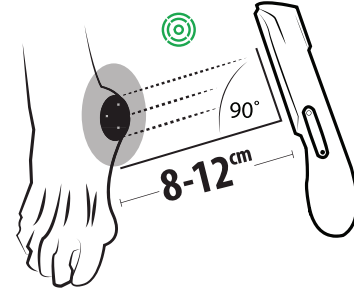

d. Utilice el telémetro para alcanzar la distancia adecuada (la luz se volverá verde).

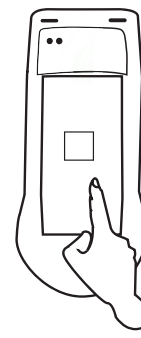

e. Toque la pantalla para mejorar el enfoque en caso necesario.

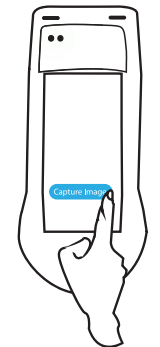


f. Para tomar una imagen o un vídeo, la luz del telémetro debería mantenerse de color verde.


## 5. TOMA DE IMÁGENES Y VÍDEOS POR FLUORESCENCIA




a. Utilice el botón de inicio para acceder a la pantalla y utilice el control deslizante en caso necesario.

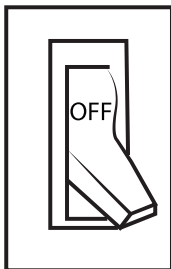


b. Apague las luces de la habitación.

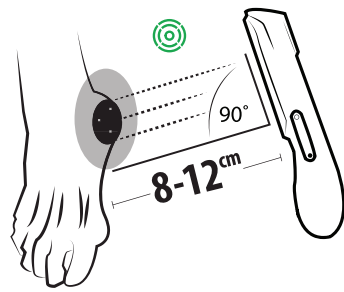


c. Utilice el telémetro para alcanzar la distancia adecuada (la luz se volverá verde).

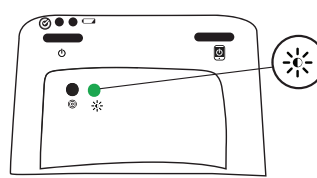


d. Confirme que la luz del sensor de la luz ambiental está en verde antes de cambiar el interruptor basculante al modo FL.

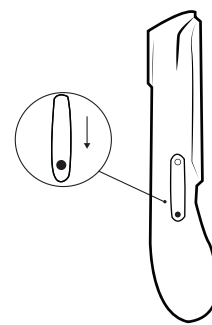

e. Active el modo FL; al hacerlo, la luz del sensor de la luz ambiental se apagará.


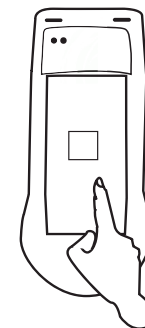


f. Toque la pantalla para mejorar el enfoque en caso necesario.

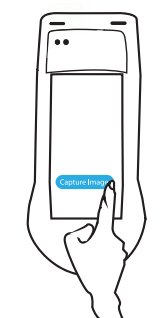


g. Para tomar una imagen o un vídeo, la luz del telémetro debería mantenerse de color verde.

## 6. APAGADO (OFF)

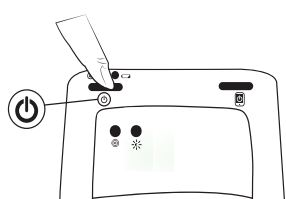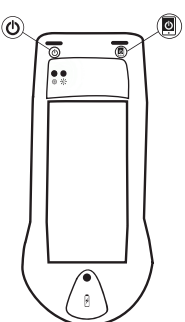

a. Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón OFF durante 3 segundos.

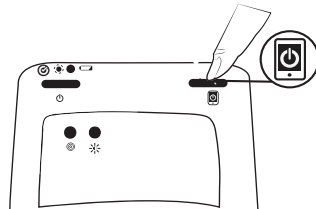

b. Para apagar la pantalla de visualización, mantenga presionado el botón OFF durante 3 segundos.



# MolecuLight